

BRUKSANVISNING
FOR
FITFORM VARIO PRO



Innholdsfortegnelse

1. Monteringsanvisning	2
2. Bruksanvisning	3
3. Feilsøking	4
4. Servicepunkt	4

1. Monteringsanvisning

Fitform Vario Pro leveres ferdig montert og tilpasset fra leverandør. Eventuelle etterjusteringer foretas på stedet ved levering. Senere justeringer eller tilpassinger bestilles av din Hjelpemiddelsentral eller ansvarlig leverandør.



2. Bruksanvisning

Tilslutt nettkabelen i eget nettutak med merkespenning 230 V.
Fitform Vario Pro kan nå betjenes med håndkontroll HB3

A. Benstøtte opp

Når knapp A trykkes inn vil benstøtten gå opp.
Hvis du vil ha fotbrettet høyere enn endeposisjonen kan knapp D trykkes inn. Hele seteenheten tiltes da bakover. Benstøtten kan ikke reguleres når stolen er i oppreisningsstilling. Hvis benstøtten ikke går opp, sjekk at stolen er helt nede (knapp D)

B. Benstøtte ned

Når knapp B trykkes inn går benstøtten ned igjen.

C. Oppreisning og tiltregulering

Når knapp C trykkes inn går stolen fra liggende til sittende stilling (tilt). Holdes knappen inne starter stolen oppreisningsfunksjonen. Benstøtten går da ned før oppreisningen begynner.

D. Fra stående til sittende og tiltregulering

Når knapp D trykkes inn går stolen tilbake fra stående til sittestilling. Holdes knappen inne starter tiltfunksjon til hvileposisjon. Hvis knapp A så trykkes inn, går benstøtten ut og du får en komfortabel hvilestilling.

E. Regulere rygg fremover

Dette gir en mer oppreist sittestilling.


F. Regulere rygg bakover

Denne knappen kan benyttes til to formål:

- I. Rygg kan reguleres til ønsket vinkel
- II. Dersom stolen er tiltet bakover (hvilestilling) kan ryggen reguleres videre bakover til sovestilling

G. Låseknapp

Låseknapp/barnesikring: Trykk låseknapp for å blokkere betjeningen, kontroll-lampen vil da blinke. Trykk en gang til , til lampen slutter å blinke for reaktivering av håndkontrollen.

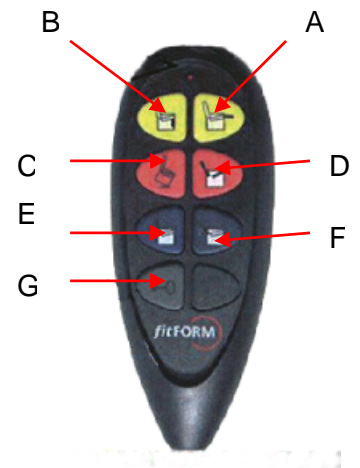

REGULERE VINKEL PÅ ØVRE DEL AV RYGG (HODESTØTTE)

Dette gjøres med håndkraft ved å dytte øvre del av ryggen bakover/fremover.

MERK !

Mer inngående informasjon om bruk og vedlikehold finnes i stolens brukerveiledning.

3. Feilsøking

Feilindikator	Tiltak
Stolen lar seg ikke regulere	<ol style="list-style-type: none">1. Sjekk at nettkabel er tilsluttet nettuttak med nettspenning 230 V2. Kontakt Hjelpemiddelsentralen eller ansvarlig leverandør.
Stolen går tregt eller "knirker"	<ol style="list-style-type: none">1. Smør bevegelige deler i understellet som beskrevet i punkt 7 i brukerveiledning.2. Kontakt Hjelpemiddelsentralen eller ansvarlig leverandør.
Stolen beveger seg rykkvis	Kontakt Hjelpemiddelsentralen eller ansvarlig leverandør.
Stolen er ustabil	Sjekk at stolen står plant på underlaget.

Stolen må ikke benyttes dersom mekanismen er defekt eller man har mistanke om dette !

4. Servicepunkt

Forhandler:

Medema-gruppen AS
Postboks 133
1483 Skytta

Tlf.: 815 32 400

Utlevert av:

Serviceverksted:

