

# Stepless

## Skinner og ramper



Vedlikeholdsfrie, ekstruderte og elokserte aluminiumsprofiler – økt stabilitet og styrke

Formstøpte nylonlidelere – øker stabiliteten, holder smuss og sand ute, gjør innstilling av lengde enkelt og lydløst, og forhindrer rasling under transport

Myke, avrundede bærehåndtak – behagelige og varme under transport

Integrert sklisikring – gir et godt fotfeste under alle forhold og slites ikke

### Valg av skinnelengde

Valg av skinnetype- og/lengde avhenger av brukerens og eventuelt helperens muligheter, plassforhold, belastning, samt størrelsen på høydeforskjellene. Velg alltid en lengst mulig skinne. Jo lenger skinnen er,

desto mindre blir stigningen og dermed blir stigningen lettere å forsere. Generelt anbefales følgende maksimale stigninger: Selvbetjent manuell rullestol: **Maksimal stigning 1:7.** Elektrisk rullestol eller manuell rullestol kjørt


av medhjelper: **Maksimal stigning 1:5.**

**Eks.:** En høydeforskjell på 20 cm og maksimal stigning på 1:5 gir en rampe med lengde 100 cm ( $5 \times 20 = 100$ ).

### Lavere, avrundede hjørner



**Skinnelåsen** låser skinnen og forhindrer at den glir fra hverandre under transport.

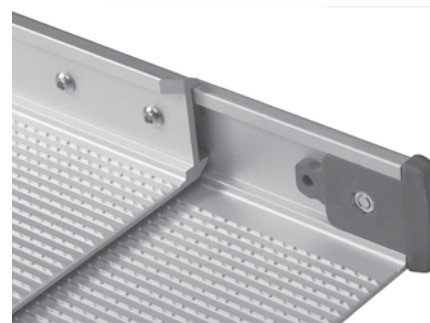

# Stepless Skinner og ramper



### 1. Skinne Teleskop

Fleksibel skinne som kan brukes på mange steder og ved forskjellige nivåer, der høyde og lengde kan variere – tar liten plass når den ikke er i bruk.



### 2. Rett skinne

Velegnet ved like høydeforskjeller, ved behov for lavest mulig vekt, og hvor rampen ofte brukes på samme sted.




### 3. Foldbar skinne

Velegnet ved like høydeforskjeller. Tar liten plass når den ikke er i bruk, og er lettere å transportere enn de faste rampene.




### 4. Bred rett rampe

Velegnet der hvor rampen ligger permanent, eller alltid brukes på samme sted. Gir økt sikkerhet for både bruker og medhjelper. Godt egnet til scootere og elektriske rullestoler, hvor høy komfort er avgjørende.

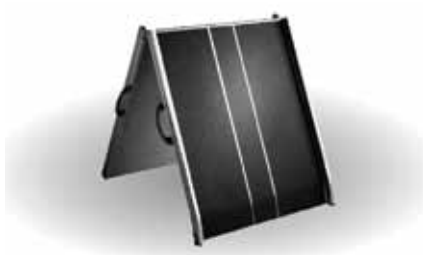

### 5. Bred foldbar rampe

Velegnet der hvor rampen brukes på de samme steder, samt til plassering i bilen. Gir økt sikkerhet for både bruker og medhjelper. Godt egnet til scootere og elektriske rullestoler, hvor høy komfort er avgjørende. Tar mindre plass enn en fast rampe når den ikke er i bruk.

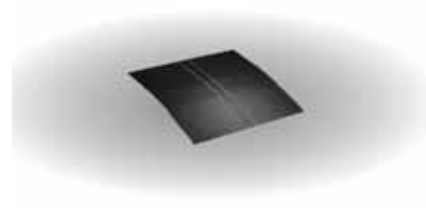

### 6. Terskeleminator

Terskeleminatoren plasseres oppe på eksisterende terskel og letter derved oppkjøringen på begge sider. Den består av en bøyd 3mm aluminiumplate med sklisikkert sort belegg.

### Stepless koffertrampe - foldbar og foldbar teleskop

Perfekt til å utligne større nivåforskjeller. En bred rampe som er lett å dra ut til ønsket lengde. Rampen foldes i bredden og skyves inn i lengden og er dermed meget plassbesparende ved transport og oppbevaring.



Foldbar




Foldbar teleskop




# Stepless bestillingsdata

Helningsdiagram 1:5 

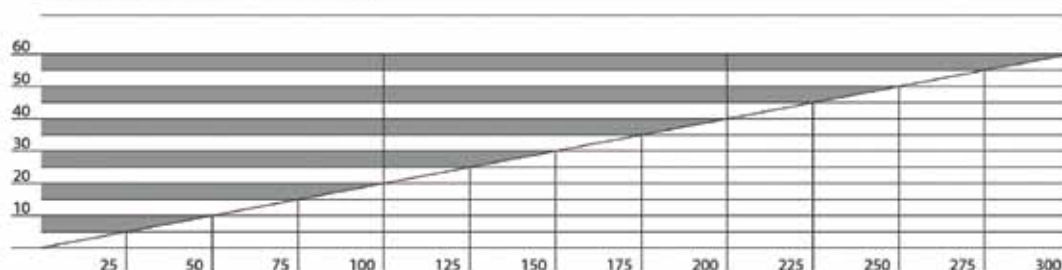

Helningsdiagram 1:7 

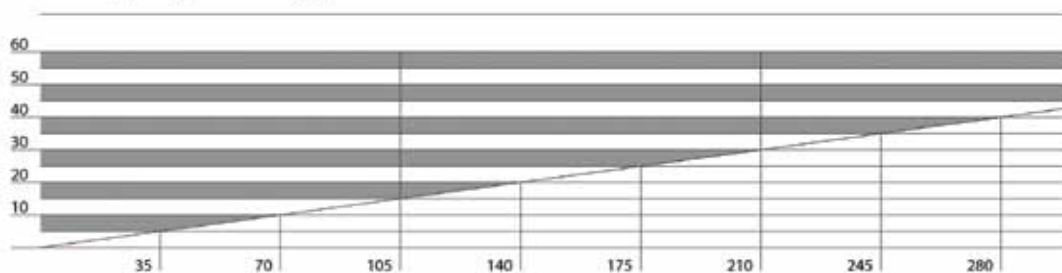

Varenr	HMS artnr.	Varenavn	Maks lengde	Min lengde	Innvendig bredde cm	Maks belastning kg	Egenvekt kg pr. stk	Transp. dim LxBxD cm
VG30000-050		Skinne rett 50cm	50		18,2	350	1,5	53x26x5,8
VG30000-105		Skinne rett 105cm	105		18,2	350	3,2	108x26x5,8
VG30000-130		Skinne rett 130cm	130		18,2	350	3,9	133x26x5,8
VG30000-155		Skinne rett 155cm	155		18,2	350	4,7	158x26x5,8
VG30000-200	017329	Skinne rett 200cm	200		18,2	350	6	203x26x5,8
VG30020-110		Skinne foldbar 58-110cm	110	58	18,2	350	4	58x26x12,5
VG30020-160		Skinne foldbar 83-160cm	160	83	18,2	350	5,7	83x26x12,5
VG30020-210		Skinne foldbar 108-210cm	210	108	18,2	350	7,2	108x26x12,5
VG30020-260	017338	Skinne foldbar 133-260cm	260	133	18,2	350	8,6	133x26x12,5
VG30020-310	017339	Skinne foldbar 158-310cm	310	158	18,2	350	10,1	158x26x12,5
VG30015-100	017330	Skinne teleskop 70.5-102cm	102	70,5	18,2	350	4,3	73x28x6,5
VG30015-150	017331	Skinne teleskop 95.5-150cm	152	99,5	18,2	350	5,7	98x28x6,5
VG30015-200		Skinne teleskop 120.5-202cm	202	120,5	18,2	350	7,2	123x28x6,5
VG30015-250		Skinne teleskop 145.5-252cm	252	145,5	18,2	200	8,6	148x28x6,5
VG30015-300		Skinne teleskop 170.5-302cm	302	170,5	18,2	200	10,1	173x28x6,5
VG30030-100		Rampe rett bred 100cm	100		77	350	9,7	103x88x5,8
VG30030-125		Rampe rett bred 125cm	125		77	350	12,1	128x88x5,8
VG30030-150		Rampe rett bred 150cm	150		77	350	14,4	153x88x5,8
VG30030-200		Rampe rett bred 200cm	200		77	350	19,1	203x88x5,8
VG30030-300		Rampe rett bred 300cm	300		77	350	28,6	303x88x5,8
VG30040-150		Rampe foldbar bred 78-150cm	150	78	77	350	17,5	78x88x5,8
VG30040-200		Rampe foldbar bred 103-200cm	200	103	77	350	22,2	103x88x5,8
VG30040-250		Rampe foldbar bred 128-250cm	250	128	77	200	26,9	128x88x5,8
VG30040-300		Rampe foldbar bred 153-300cm	300	153	77	200	31,7	153x88x5,8
VG30060-090		Rampe koffert foldbar 90cm	92	92	76	325	7,3	92x40,5x8,5
VG30060-120		Rampe koffert foldbar 120cm	122	122	76	325	9,6	122x40,5x8,5
VG30060-150		Rampe koffert foldbar 150cm	153	153	76	325	12,1	153x40,5x8,5
VG30060-180		Rampe koffert foldbar 180cm	183	183	76	325	14,3	183x40,5x8,5
VG30070-180		Rampe koffert foldbar teleskop 180	183	112	76	325	16,4	112x40,5x13
VG30070-210		Rampe koffert foldbar teleskop 210	213	127	76	325	18,9	127x40,5x13
VG30070-240		Rampe koffert foldbar teleskop 240	244	143	76	325	21,4	143x40,5x13
VG30070-300		Rampe koffert foldbar teleskop 300	305	173	76	200	26,4	173x40,5x13
VG39167		Terskeleleminator br 67cm					3,6	67x60x2,5
VG39177		Terskeleleminator br 77cm					4,2	77x60x2,5

# Stepless Lite Skinner



Stepless Lite skinner – til reiser, ferie eller kanskje en bytur

- Lav vekt – lett å transportere
- Består av en blanding av glass- og granittfiber – lett og sterk
- Overflaten har antisklibelegg

Modell	Maks belastning kg/sett kg/stk	Egenvekt	Lengde x Bredde
Lite 70 cm	300	3.5	70 x 73
Lite 85 cm	300	4.0	85 x 78
Lite 125 cm	300	6.0	125 x 78
Lite 165 cm	300	7.5	165 x 78
Lite 205 cm	300	9.5	205 x 78



Varenr	Varenavn
VG30100-070	Skinne lettvekt Stepless Lite 70cm
VG30100-085	Skinne lettvekt Stepless Lite 85cm
VG30100-125	Skinne lettvekt Stepless Lite 125cm
VG30100-165	Skinne lettvekt Stepless Lite 165cm
VG30100-205	Skinne lettvekt Stepless Lite 205cm
VG30100-000	Veske til 70cm Skinne