




medemagruppen



# Brukerveiledning Ledsagerstyring Forus



STOLEN MÅ IKKE LØFTES ELLER  
VIPPES MED HÅNDTAKET!

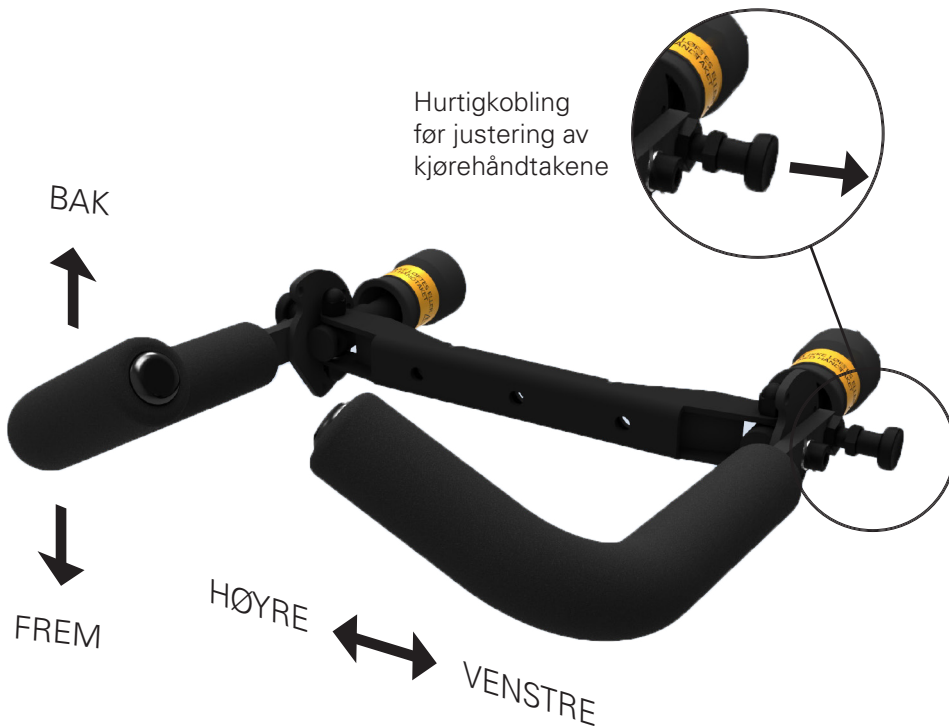

## TEKNISK INFORMASJON

Dette produktet er konstruert som tilbehør til elektriske rullestoler eller manuelle rullestoler med elektrisk hjelpemotor. Hensikten med produktet er å skape en komfortabel og ergonomisk riktig bevegelse for ledsageren som går bak og styrer stolen.

Enheten er solid og består av komponenter laget i stål, aluminium og plast. Alle deler som er utsatt for korrosjon er overflatebehandlet med en pulverlakk som gir en hard, robust overflate som tåler en del slitasje.

## BRUK AV LEDSAGERSTYRING

Kjørehåndtakene er en "forlengelse av Styreboksen". Når kjørehåndtakene trykkes ned vil stolen bevege seg fremover, løftes håndtakene opp beveger stolen seg bakover. Når man skyver kjørehåndtakene til venstre svinger stolen til høyre og tilsvarende vil stolen svinge til venstre når kjørehåndtakene skyves i motsatt retning. Når man slipper håndtakene går de automatisk tilbake til midtstilling, og stolen vil stanse.

### Justering av kjørehåndtakene

Ledsagerstyringen er utstyrt med en hurtigkobling som gjør at man enkelt kan justere kjørehåndtakene i forskjellige høyder, dette gjør det mulig å regulere håndtakene til en behaglig kjørestilling. Kjørehåndtakene kan også slås helt ned i en "parkeringsstilling" (for å minske plassbehovet) når stolen ikke er i bruk. Dette bør man gjøre under transport og lagring for å minske faren for skader.

### Nødstopp

Nødstopp skal alltid være montert i ladeplugg ved bruk av stolen i bevegelse. Hvis "nødsituasjoner" skulle oppstå og stolens bevegelser må stanses trykkes nødstopppknappen ned. Strømforsyningen blir brutt, og stolen stanser umiddelbart. For å kunne kjøre stolen igjen må nødstopppknappen vriss slik at den igjen kommer opp i normal stilling.

## VEDLIKEHOLD OG REPARASJON

- Kontroller ledsagerstyringens funksjon jevnlig.

OBS! Hvis ledsagerstyringen ikke oppfører seg normalt må den ikke brukes!  
Kontakt snarest leverandør.

- Sjekk med jevne mellomrom at ledsagerstyringen er godt festet til stolen.
- Kontroller at alle skrueforbindelser på festeplaten, festematerialet og nødstoppen er i orden.
- Skift mosegummien på kjørehåndtakene hvis disse er skadet.

## ERKLÆRING OM SAMSVAR OG GARANTI

Attende AS har levert denne ledsagerstyringen i samsvar med  
EMC direktiv 89/336/EØF, 92/31 EØF,  
Direktiv om medisinsk utstyr 93/42/EØF  
Maskindirektiv 89/392/EØF  
Forskrift om elektrisk utstyr

Samsvarserklæring er utstett. CE merket på enheten er beviset på at kravene er oppfylt.

I henhold til EU's forskrifter for denne typen utstyr garenteres ledagerstyringen mot fabrikasjonsfeil i 2 år, forutsatt at enheten er montert med tilpasset festemateriell levert av Attende AS, og at nødstoppbryteren er montert.

Når unormal slitasje oppstår, som følge av "unormal bruk," eks. for store belastningen som oppstår ved bruk av kjørehåndtakene som "løfteredskap," må fjærhuset komplett, med varenummer 41984, skiftes.

OBS! Man må aldri benytte ledsagerstyringens kjørehåndtak/ hendler til å løfte eller vippe stolen over fortaus kanter og lignende! Dette kan medføre deformering av enkelte komponenter inne i enheten, som igjen vil gjøre at enheten ikke fungerer tilfredsstillende.

## LEDSAGERSTYRING KAN UTSTYRES MED FORSKJELLIGE STYREBOKSER

1. stolen er både bruker og ledsagerstyrt
2. stolen er kun ledsagerstyrt

Hvis stolen er både bruker og ledsagerstyrt:

Grønn knapp velger styreposisjon  
Gul knapp velger hastighet



Hvis stolen er kun ledsagerstyrt:

Hvit knapp er AV/PÅ  
Blå knapp velger hastighet fra 1-5

De fleste ledsagerstyringer er utstyrt med betjeningspanel som styrer setefunksjoner.





**medemagruppen**