


Vinkelbeslag for setebærer CLEO

1. Bruk av de enkelte størrelsene:


Str. 1 for SB24 og 26

Str. 2 for SB28 og 30

Str. 3 for SB32 og 34

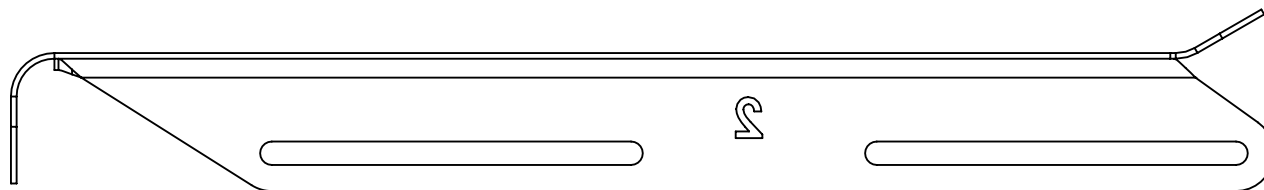

Montering av vinkelbeslaget ved lange setedybder: Anbefales alltid brukt når framkanten av seteplaten skal stikke ut forbi sideplaten eller posisjoneres umiddelbart foran denne.

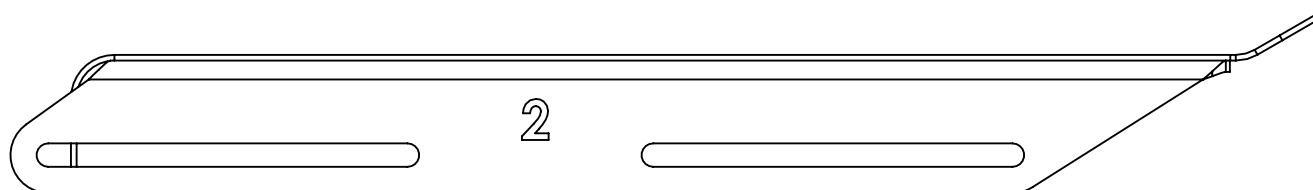

Montering av vinkelbeslaget ved korte setedybder: Brukes normalt kun når seteplaten er tilbaketrukket slik at den ikke (eller kun i ubetydelig grad) skal stikke ut foran sideplaten.