



medemagruppen



# Bruksanvisning Styreboks DX2 Rem550

## Innledning DX2


DX2 er den første i en ny generasjon joysticker til styring av elektriske rullestoler. Ved hjelp av den store LCD-fargeskjermen og den logiske ikonoppbygde menystrukturen fører den brukeren fram til målet.

## Betegnelser - knapper

Dynamic DX2 AJR		
	1	Start/stopp-knapp
	2	Blinklys høyre
	3	Funksjonsvelger
	4	Adgang til brugermeny
	5	Horn
	6	Joystik + velg og enter
	7	Brugerprofil / hastighet
	8	Display
	9	Advarsels LED
	10	Blinklys venstre

## Betjening

Øverst i displayet vises statusbjelken. Batteriindikatoren vises hele tiden. Klokken kan slås av og på etter eget ønske. De andre ikonene lyser når tilhørende funksjon er aktiv.

	
1	Batteriindikator Grønn = full ladet Gult = minst halvfullt Rød = nesten tomt - lad nå!
2	Blinklys venstre er aktivt Ved nødblink blinker begge ikonene
3	Lyset er tent
4	Feilkode - se avsnitt om feilkoder
5	Blinklys høyre er aktivt Ved nødblink blinker begge ikonene
6	Aktuell tid

## Slå på/av klokke

Trykk på pil opp/ned eller joystick (press forover) til ikonet ovenfor vises i midten.

Bruk "funksjonsvelgeren" til å skifte mellom X og ✓.

Godta med et trykk på pil opp/ ned tasten.



## Still klokken

Bruk pil opp/ned til klokken vises i midten.

Bruk joystick (press forover) for å velge innstillinger. Følgende bilde vises.



Bruk "funksjonsvelgeren" eller joystick høyre/venstre for å velge det sifferet som skal endres.

Joystick forover teller opp.

Joystick tilbake godta de nye innstillingene og gå tilbake til hovedmenyen.

Pil opp/ned avvise de nye innstillingene og gå tilbake til hovedmenyen.



## Stille inn hastighet

Ved aktivering av joysticken vises bildet under i displayet. I midten vises hastigheten brukeren har valgt som maks. hastighet. Hastighet velges ved å trykke på pluss/minus. Høyeste hastighet er 5, laveste hastighet er 1.



De nederste funksjonene velges med knappen ”funksjonsvelger”.

## Justere sete, rygg og benstøtter



Trykk på pil opp/ned til bildet viser stolen. Bruk ”funksjonsvelgeren” til å velge den funksjonen som skal endres. Bruk joysticken til å endre f.eks. vinkelen på seteryggen.

<b>Funksjon</b>	<b>Ikon</b>
Tiltfunksjon	
Ryggvinkel	
Seteheis	
Venstre benstøtte	
Høyre benstøtte	
Benstøtter begge	

Kun de tilgjengelige innstillingene blir vist.

## Slå på/av lys




Trykk på pil opp/ned til ikonet for lys vises i midten.

Press deretter joysticken forover for å slå på lyset. Press den forover igjen for å slukke lyset.

Press joysticken bakover for å aktivere nødblink. Det slukkes på samme måte.

Press joysticken til høyre eller venstre for å aktivere blinklys. Det slukkes på samme måte.

## Stille inn skjermlys

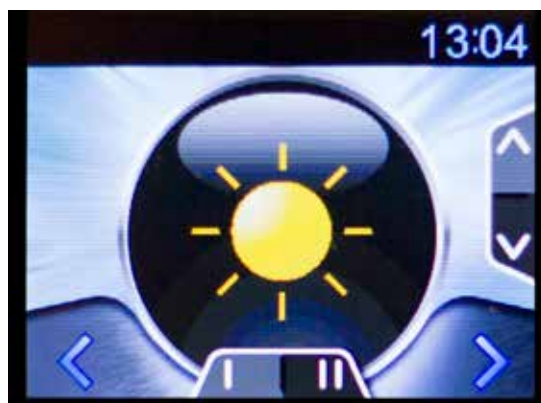

Trykk på pil opp/ned til solen vises i midten. Press joystick forover for å få fram innstillingene. Bruk deretter knappen "funksjonsvelger" eller joystick høyre/venstre for å endre lysstyrke.

Joystick forover/bakover eller pil opp/ned godtar de nye verdiene og går tilbake til hovedmenyen.

## Stille inn skjermmiljø

Trykk på pil opp/ned til ikonet "dag/natt" vises i midten. Press joystick forover for å velge innstillinger. Bildet under vises.



Exit / Cancel

Exit / Cancel



Opsætning	Resultat
1 - Innendørs	Skjermen har lys bakgrunn
2 - Utendørs	Skjermen har mørk bakgrunn
3 - Automatisk	Skjermen skifter bakgrunnsfarge (svart/hvit) avhengig av lyset i omgivelsene

Bruk "funksjonsvelgeren" eller joystick mot høyre/venstre for å velge innstilling.

Joystick forover godtar de nye innstillingene og går tilbake til hovedmenyen.

Joystick bakover eller pil opp/ned annullerer de nye innstillingene og går tilbake til hovedmenyen.



<b>Låse opp DX-systemet</b>	
	Trykk på på-/avknappen. Systemet viser en lås i displayet.
	Trykk på hornet to ganger innen 10 sekunder. Systemet starter som normalt.

## Feilkoder

<b>Kode</b>	<b>Årsag</b>	<b>Betydning</b>
1	DX Modulet	<p>Kan bety:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- feil i programmering</li> <li>- feil i ledningsforbindelse</li> <li>- intern feil i en modul</li> </ul> <p>Slå stolen av og på. Hvis det ikke virker, kontakt kvalifisert tekniker (HMC eller terapeut).</p>
2	DX Accessory	<p>Kan bety:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kjører langsomt pga. hevet sete (programmering). Ikke en feil.</li> </ul> <p>Senk setet til laveste posisjon. Hvis det ikke virker, kontakt kvalifisert tekniker (HMC eller terapeut).</p>
3	Motor 1 / R (M1)	<p>Kan bety:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- løs forbindelse mellom motor og strømmodul</li> <li>- kortslutning</li> </ul> <p>Kontroller at ingen kontakter er løse. Kontakt kvalifisert tekniker (HMC eller terapeut).</p>
4	Motor 2 / L (M2)	<p>Kan bety:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- løs forbindelse mellom motor og strømmodul</li> <li>- kortslutning</li> </ul> <p>Kontroller at ingen kontakter er løse. Kontakt kvalifisert tekniker (HMC eller terapeut).</p>
5	Parkeringsbremse 1 (M1 R)	<p>Kan bety:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- løs forbindelse</li> <li>- kortslutning</li> </ul> <p>Kontroller at ingen kontakter er løse. Kontakt kvalifisert tekniker (HMC eller terapeut).</p>
6	Parkeringsbremse 2 (M2 L)	<p>Kan bety:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- løs forbindelse</li> <li>- kortslutning</li> </ul> <p>Kontroller at ingen kontakter er løse. Kontakt kvalifisert tekniker (HMC eller terapeut).</p>



## Sikkerhetskontroll

### Daglig sikkerhetskontroll:

Det elektroniske systemet har en innebygget sikkerhetskontroll som utføres opptil 100 ganger i minuttet. I tillegg til denne kontrollen skal følgende kontrolleres regelmessig:

- Slå elektronikken av (ingen lys i displayet)
- Se om joysticken er bøyd
- Se om joysticken på andre måter er skadet
- Se om joysticken går tilbake til midtstilling når man slipper den

Hvis det konstateres problemer under denne kontrollen, kontaktes en kvalifisert tekniker før stolen tas i bruk igjen.

### Ukentlig sikkerhetskontroll

Parkeringsbrems: Skal testes på et flatt underlag med minst en meter fri plass rundt stolen.

- Start stolen og før joysticken langsomt fremover til det høres et klikk. Stolen kan begynne å bevege seg i denne stillingen.
- Slipp straks joysticken og lytt etter klikkelyden som skal komme før det har gått et sekund.

Gjentas i alle kjøreretninger!

- Kontroller at gummiskallet omkring joysticken er hel. Det er viktig for å forhindre at det kommer fukt inn til elektronikken.
- Kontroller at styreboksen er forsvarlig skrudd fast.

Hvis det konstateres problemer under denne kontrollen, kontaktes en kvalifisert tekniker før stolen tas i bruk igjen.

### Månedlig kontroll

Kontroller minst en gang i måneden at dekktrykket er korrekt. Det skal være 35 psi / 2,4 bar.



**medemagruppen**