

Monteringsanvisning for SWINGBO-VTi Joggevognsfront

Settet inneholder følgende:

- 1 x komplett joggevognsfront
- 2 x adapterrør med avstandsring
- 1 x fremre koplingsenhet venstre
- 1 x fremre koplingsenhet høyre




Verktøy du trenger:

- Skralle med unbracobits 4, 5 og 8
 - Fastnøkkel 13mm
 - Momentnøkkel med unbracobit 8 innstilt på moment 25 NM
- Drill med bor 6mm (ikke avbildet),




Veiledningen beskriver monteringen på én side. Den andre siden monteres tilsvarende.

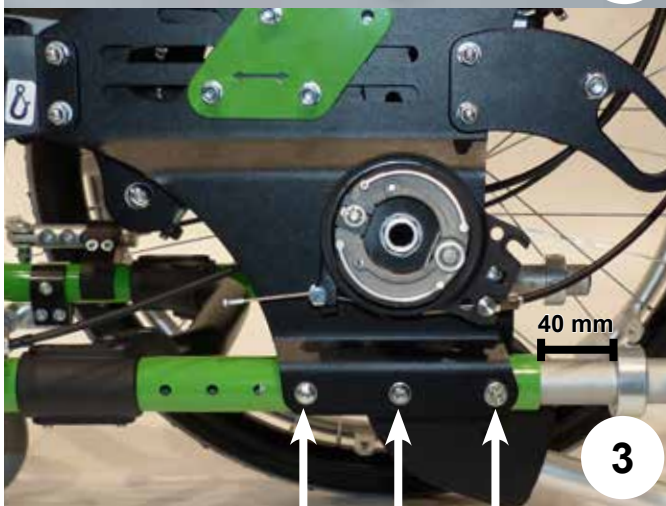


- Løsne og ta ut de tre boltene (markert med pil) fra stolrammen bak, og sett inn adapterrøret.

- Se til at avstanden mellom enden på rammerøret og avstandsringen er 40mm.

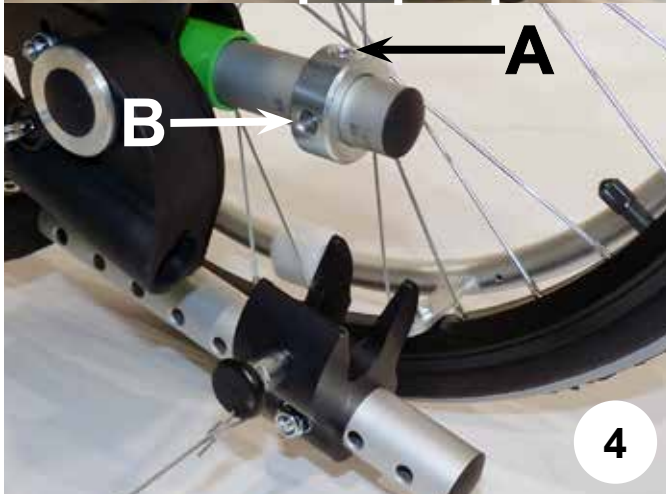

Låseskruen på avstandsringen skal peke rett opp (A) og hullet (B) innover

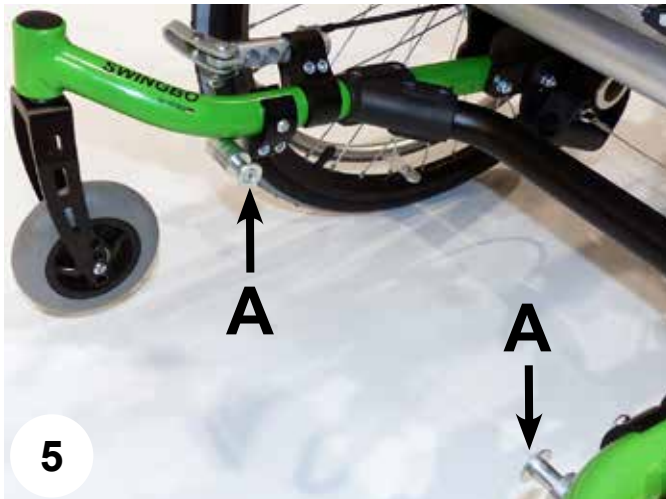

- Skru fast den fremre koplingsenheten på rammerøret foran
- Påhektningstappen (A) skal peke innover.



- Juster posisjonen til den fremre koplingsenheten slik at avstanden fra senter av påhektningstappen bakover til midt på avstandsringen blir 425mm.



- Ikke stram til festeskruene ennå



- Juster krokfestet (A) for påhektningstappen på den fremre koplingsenheten samt det bakre koplingsgrepet (C) slik at det passer med stolens rammelengde og hullet i avstandsringen bak på adapterrøret.
- Avstanden mellom joggevoognshjulet og fotplaten tilpasses ved å bruke de mulighetene hullmønsteret i fronten gir.
- Stabilisatorstaget (B) posisjoneres og festes etter at man er ferdig med monteringen av koplingsenhetene.



- Framhjulets akslingstapp kan også brukes som håndtak.
- Hvis rørene på joggevognsfronten stikker langt ut bak, kan de kappes.
- Vær imidlertid oppmerksom på at det kan bli behov for å flytte rørene lenger fram om man på et tidspunkt må øke stolens setedybde.



- Før krokfestene i inngrep med påhektningstappene på begge sider.



- Løft opp rullestolens svinghjul inntil den fjærbelastede låsesplinten på det bakre koplingsgrepet klikker i inngrep med hullet på avstandsringen.
- Finjuster festeenhetene ved behov.
- Stram til alle festeskruer.



Stram til alle festeskruer ordentlig!



- Bor hull i rammen som vist.




- Sett inn skruen M6x50, monter skiven og og skru til med M6-låsemutteren.



Stram til alle festeskruer ordentlig!



- Juster høyden på fronthjulets akslingstapp slik at rullestolens svinghjul kommer i ønsket avstand fra bakken.

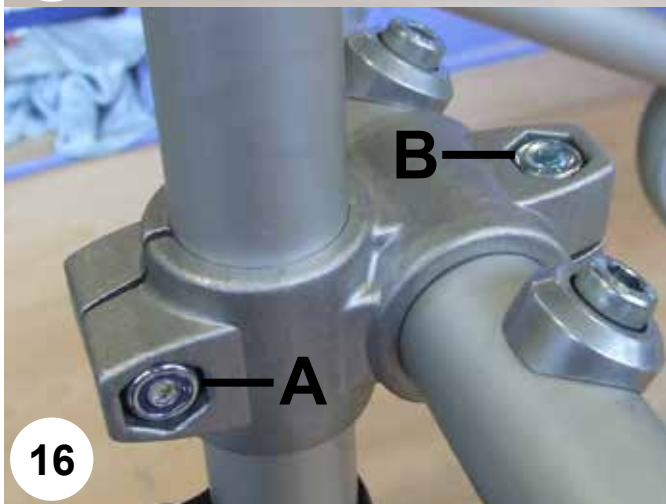

- Høyden på akslingstappen justeres etter at man har løsnet skruen i posisjon A. Nå kan rullestolens svinghjul fikseres i ønsket avstand til bakken.

- Juster til slutt fronthjulets akslingstapp til loddrett stilling etter å ha løsnet på skruen i posisjon B.

- Begge skruene (A og B) skal strammes til 25 NM med momentnøkkel.



Påsetting av joggevognsfronten:

- Ta av begge tippesikringsrørene.



18

- Hekt på joggevognsfronten i fremkant først. (Se også bilde 7 og 11.)



19

- Tipp stolen opp foran gjennom å trykke ned kjørebøylen, inntil låsesplintene i de bakre kopplingsgrepe klikker i inngrep med hullene i avstandsringen. (Se også bilde 12.)
- Se til at splintene har låst ordentlig.
- Hvis splintene ikke klikker ordentlig i inngrep, kan det bli nødvendig å finjustere plasseringen av avstandsringene.



20

Ta av joggevognsfronten:

- Stå bak rullestolen.
- Løft fronthjulet klar av bakken gjennom å trykke ned kjørebøylen.
- Trå lett på wiren med skotuppene slik at låsesplintene trekkes ut av inngrep.
- Slipp trykket på kjørebøylen og senk fronthjulet ned på bakken igjen.



21

- Hekt fronten av krokfestene i fremkant og ta den helt av.